

흡수성합성폴리머재료 (Ostene)

■제 품 명 : 흡수성합성폴리머재료

■형 명 : Ostene

■사용목적 : 수술 시 뼈의 출혈을 지혈하기 위하여 사용한다. 본 제품은 물리적 보호막을 제공함으로써 수술 시 뼈의 표면으로부터의 출혈을 조절하기 위해 국소적 지혈작용을 한다.
이 작용은 생화학적 작용이 아니다.

■사용방법

가. 사용전의 준비 사항

- 1) 해당제품의 포장용기가 파손된 곳은 없는지 점검한다.
- 2) 본 제품은 멸균된 상태로 공급되므로 포장재질의 파손이 없는지 확인하여 멸균된 제품만을 사용하여야 한다.

나. 사용방법 및 조작순서

- 1) 사용 전 포장 및 내용물이 완전하게 보전되었는지를 확인한다.
- 2) 해당제품의 사용 유효기간을 확인 한다.
- 3) 전문의가 시술도구를 이용하여, 무균적으로 뼈의 출혈 부위에 위치 시켜 압박한다.

※ 경고

1. 1회용 제품으로 재멸균하여 사용하지 않는다.
2. 직사광선을 피하고 실온에 보관한다.

※ 금기

1. 활동 혹은 잠복 감염 부위에는 사용하지 않는다.
2. 뼈의 구조적 지지를 위해 사용하지 않는다.

■사용시 주의사항

1. 본 품은 일회용이므로 재사용 또는 재멸균하지 않는다.
2. 개봉되거나 손상된 제품은 폐기한다.
3. 제품의 유실이 있을 때는 사용하지 않는다.
4. 본 제품은 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관한다.
5. 감염의 우려가 있음
6. 뼈의 구조적 지지를 위해 사용하지 않는다.

■포장단위 : 1 BOX (12ea/BOX)

■저장방법 : 실온보관

■수 입 자 : (주)박스터, 서울시 중구 청계천로 40, 한국관광공사빌딩 5층

■제조회자 : Ceremed, Inc. (미국)

제 조 자 : Biomed Technologies, Inc. (미국)

■수입품목허가번호 : 제 수허 08-664호

※사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상 또는 사용상의 부주의에 기인하지 아니한 제품의 하자 발생시 구입처 혹은 본사(02-6262-7100)에서 교환하여 드립니다. (제품설명서 작성일 : 2012년 11월19일)

일회용 멸균 의료기기, 재사용금지

K1912

제 품 명 : 흡수성합성폴리머재료
크 기 : 110x190